


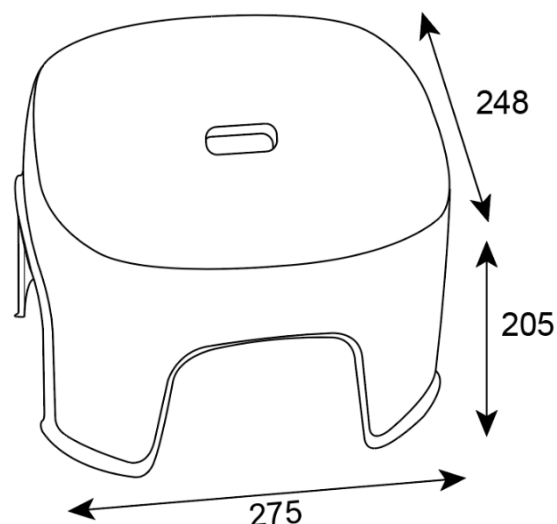

GEYSER® Komfort- og hjælpetaburet

Betingelser

for brug: Taburetten et hjælpeprodukt. Produktet må kun anvendes til de beskrevne formål. Produktet er uegnet som legetøj for børn.

Før brug: Taburetten aftørres med en fugtig klud, og det skal sikres at anti-skrid gummisålen under alle fire ben sidder sikkert fast, og er ubeskadiget.

Ibrugtagning: Gulvet skal være rent, jævnt, lige og fri for støv og enhver urenhed. Taburetten stilles på et fast rent underlag. Taburetten må aldrig stilles på løse tæpper og måtter.

Anvendelse: Taburetten må kun stilles direkte på gulvet, og anvendes til at stå eller sidde på. Taburetten er stabelbar når den ikke anvendes.

Belastning: Maksimal belastning 80 kg.

Temperatur: Anvendes ved rum- og gulvtemperaturer mellem 10°C og 40°C.

Materiale: Hvid / Sort PP-Plast. Undersiden af benene er påført en anti-skrid gummisål.

Rengøring og vedligeholdelse:

Taburetten skal aftørres umiddelbart efter brug. Produktet kan vaskes ved 30°C og aftørres med en tør klud. Anvend kun neutrale ikke-slibende rengøringsmidler. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på produktet.

Sikkerhed: Anti-skrid gummisålerne under benene skal efterkontrolleres hver tredje måned.

Garanti: 5 års garanti mod fabrikationsfejl.

Udenfor

garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer og skader efter tilkalkning og kemikalier.